

## Světlo léčba - Biolampa polarizační

Značka: SKn 2012-01-17-20

Datum: 27.1.2012

Vypracoval: Stanislav Korbel

Tel: +420 777 126 388



### Kat. číslo 2150.0001 - Biolampa MediCom ruční

- Kompaktní a pohotový zdroj terapeutického polarizovaného světla se širokým spektrem použití a překvapivě vysokou léčebnou účinností.
- Polarizované záření má, podobně jako laserový paprsek, vynikající schopnost specificky působit na molekulární strukturu buněčných membrán.
- Pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje se bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni.

**Biolampa** je výsledkem výzkumu v oblasti laserové terapie. Ve srovnání s laserovým paprskem je však její světlo polychromatické, tzn. vyzařuje v široké oblasti barevného spektra s maximem výkonu v rozsahu od 500 do 2.500 nm. Stejně jako laser vydává polarizovaně uspořádané záření. Díky tomu její světlo nepůsobí pouze jako obyčejný zdroj povrchového tepla, ale má schopnost cíleně proniknout do hlubších struktur tkáně a šířit se v ní.

Polarizované záření má, podobně jako laserový paprsek, vynikající schopnost specificky působit na molekulární strukturu buněčných membrán. Pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje se bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni.

**Biolampa** je výborným léčebným prostředkem, který již nalezl široké uplatnění v ambulancích, nemocnicích, kosmetických salonech, rehabilitačních zařízeních, pečovatelských domech i v mnoha domácnostech.

### Povrchové aplikace:

- akné
- alopecie
- bércový vřed
- dermatitidy
- diabetické gangrény
- hojení ran a jizev
- molusca
- opar
- opruzeniny
- pásový opar
- píštěle
- podlitiny
- proleženiny
- spáleniny
- některé druhy lupénky a ekzémů
- regenerace unavené a narušené pleti a jině...

### Hlubkové působení:

- artrózy a artritidy
- bolesti zad a šíje
- degenerativní změny
- kloubní revmatismus
- otoky a zhmožděnin
- ostruha patní kosti
- reflexní změny
- syndrom karpálního tunelu
- tenisový loket
- záněty úponů
- šlach
- svalů...

**Léčení polarizovaným světlem se stalo uznávanou léčebnou metodou v celé řadě oborů:**

- Dermatologie
- Chirurgie
- Pediatrie
- Rehabilitace
- Revmatologie
- Praktické lékařství
- Veterinární medicína
- Bezpečná a jednoduchá obsluha
- Odlehčený kompaktní design
- Nevyžaduje se použití ochranných brýlí
- Odfiltrování UV složky záření
- BIOLAMPU dodáváme s českým návodem včetně 134 popisů nastavení pro jednotlivá terapeutická použití



Kat. číslo 2150.0002





Stolní nastavitelný držák Biolampy

**Technické parametry:**

- Napájení: 220 V
- Příkon: 20 W
- Hmotnost 190 g
- Typ záření polarizované světlo
- Vlnová délka: 500 – 2500 nm
- Rozměry: 160 x 90 mm

**Příslušenství:**


- Frekvenční modulátor (pro zvýšení účinnosti)
- Časovací zařízení,
- Napájecí zdroj 230V, 50Hz / 12V, 1,6A,
- Pevný kuřík pro bezpečné uložení i přepravu,
- Nastavitelný držák (za příplatek)

Kat. číslo	Název předmětu		Cena za 1 ks bez DPH	DPH	Cena za 1 ks s DPH
	<b>Biolampa MediCom</b>				
2150.0004	<b>Biolampa MediCom ruční - sada, včetně frekvenční modulace a časovače</b>		10.324,60 Kč	14%	11.770,00 Kč
2150.0002	<b>Stolní nastavitelný držák biolampy</b>		890,40 Kč	14%	1.015,00 Kč
	<b>Biolampa MediCom - jednotlivé díly</b>				
2150.0001	<b>Biolampa MediCom ruční</b>		7.320,20 Kč	14%	8.345,00 Kč
2150.0003	<b>Frekvenční modulace a časovač biolampy</b>		3.000,00 Kč	14%	3.420,00 Kč

MEDISET  
CHIRONAX

**Termín dodání:** cca 1 - 2 týdny od potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy

**Platební podmínky:** Ceny jsou kalkulovány pro platbu v hotovosti, předplatbou bankovním převodem nebo na dobírku.

**Předání zboží:** osobní odběr nebo je možné zaslat pomocí dopravců  **EPPL** Česká pošta, PROFESSIONAL PARCEL LOGISTICS, **TOPTRANS**

Ceník dopravy: [http://www.mediset.cz/obrazky/download/www\\_mediset\\_cz-Cenik\\_dopravy.pdf](http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf)

**Záruční podmínky:** 24 měsíců od dodání na materiál a výrobní vady (není-li uvedeno jinak)

**Záruční i pozáruční servis zajišťuje:** servisní oddělení firmy MEDISET - CHIRONAX s.r.o. v Českých Budějovicích

Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj. dekontaminované a dezinfikované.

**Kontroly a BTK:** Na zdravotnické přístroje provádíme pravidelné kontroly el. bezpečnosti, na přístroje klasifikační třídy IIb a IIa také periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) dle zákona 123/2000 Sb.

Přístroje označené tlačítkem  si můžete zakoupit v našem e-shopu [www.mediset.cz/eshop](http://www.mediset.cz/eshop).

Objednávky můžete zasílat e-mailem na adresu [objednavky@mediset.cz](mailto:objednavky@mediset.cz)

**Platnost nabídky:** 60 dnů nebo do vydání nového ceníku.

**Leasing:** možnost leasingu od pořizovací ceny 40.000,00 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Aktuální ceníky a katalogy si můžete stáhnout na našich stránkách [www.mediset.cz/download/](http://www.mediset.cz/download/)



Pevný kufřík pro bezpečné uložení i přepravu



frekvenční modulátor a časovač

Foto © StandaKorbel.cz

### Tabulka doporučených frekvencí a časů























HLOUBKOVÉ APLIKACE		
Diagnóza	Orientační čas (min.)	Doporučená frekvence (Hz)
	3 - 12	8,4
ARTHRALGIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ	4 - 10	9,7
ARTHRITIDA	- malé klouby	3 - 8
	- velké klouby	5 - 15
ARTHROZA	- coxarthroza	2 - 5
	- gonarthroza	4 - 15
	- ramenní kloub	5 - 10
	- drobné ruční klouby	2 - 5
	- ostatní malé klouby	4 - 10
	- ostatní velké klouby	6 - 15
ASTHMA BRONCHIALE		10 - 15
CALCAR CALCANEI	- ostruha patní kosti	9 - 18
COCCYGODYNIE	- bolest kostrče	12 - 20
CYSTITIDA	- zánět močového měchýře	5 - 8
DEKUBITY	- proleženiny	1 - 8
DISTORZE		5 - 10
DUPYUTRENOVA KONTRAKTURA		1 - 8
DYSMENORHEA		5 - 8
EDEM	- lymfem dolních končetin	1 - 8
	- otok lokální	3 - 10
EDEM POSTTRAUMATICKÝ		5 - 12
ENTEZOPATIE	- epikondylitis (tenisový loket)	7 - 10
	- epikondylitis (golfový loket)	7 - 10
	- Hagelundova exostoza	5 - 12
	- ostatní entezopatie	5 - 10
FLEBITIS	- zánět žil	5 - 10
HEMATOM	- hematom spontánní	1 - 8
	- hematom poúrazový	2 - 10
KAUSALGIE / NEURALGIE		3 - 10
KOLIKA BŘIŠNÍ		8 - 12
MORBUS BECHTĚREV		8 - 15
MYORELAXACE	- křeč svalová	6 - 10
NATRŽENÍ ŠLACH A SVALŮ		10 - 15
OBRNA PARALYTICKÁ		8 - 15
OBRNA SPASTICKÁ		6 - 12
PERIARTHRITIS	- humeroscapularis (zmrzlé rameno)	6 - 12
	- kyčelního kloubu	8 - 15
	- ostatní periartritidy	5 - 10
REVMATITIS	- arthralgie revmatická	6 - 10
	- revmatické bolesti malých kloubů	4 - 12
	- revmatické bolesti velkých kloubů	8 - 16
SPONDYLARTHROSIS		8 - 18
SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU		5 - 12
SINUSITIS	- zánět čelních dutin	5 - 10
	- zánět čelistních dutin	5 - 10
	- zánět nosních dutin	8 - 15
TINNITUS		12 - 20
V. A. S.	- bolest páteře krční (C)	5 - 10
	- bolest páteře hrudní (TH)	8 - 12
	- bolest páteře bederní (LS)	10 - 20
	- bolest kostrče	12 - 20

ZÁNĚT PRŮDUŠEK	8 - 15	2,5
ZÁNĚTY ŠLACH A SVALŮ	3 - 15	6,8
ZHMOŽDĚNINY	5 - 15	2,4
ZLOMENINY	8 - 18	1,2

POVRCHOVÉ APLIKACE		
Diagnóza	Orientační čas (min.)	Doporučená frekvence (Hz)
ABSCES	5 - 15	1,7
AFTY	1 - 4	5,2
AKNE	3 - 5	5,5
ALOPECIA	1 - 2	4,9
ANGULI INFECTIOSI	- ústní koutky	4 - 6
BIOSTIMULACE PLETI		8 - 16
BOLESTI HLAVY	6 - 12	9,5
BOLESTI TRAUMATICKÁ	4 - 15	9,9
CITLIVÉ ZUBNÍ KRČKY	3 - 5	5,0
DECUBITUS	- proleženiny	1 - 8
DERMATITIS		1 - 5
DIABETICKÁ GANGRÉNA	8 - 15	4,6
EKZÉM	1 - 3	5,2
EPIZIOTOMIE	2 - 4	6,1
FOLLICULITIS	2 - 4	6,0
FURUNCULUS	3 - 8	1,7
CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM	8 - 20	2,5
HEMATOM POÚRAZOVÝ	5 - 10	7,9
HERPES GENITALIS	1 - 4	4,7
HERPES LABIALIS	2 - 3	4,7
HERPES ZOSTER	2 - 6	4,7
HOJENÍ RAN	5 - 20	8,2
	7 - 15	5,4
	3 - 6	1,5
JIZVA ČERSTVÁ	8 - 18	4,1
JIZVA KELOIDNÍ	2 - 8	5,4
LARYNGYTIS	6 - 15	9,5
MENORRHAGIE	8 - 15	4,0
MIGRÉNA	6 - 10	9,5
MOLUSCA	4 - 12	1,8
OPRUZENINY	5 - 10	5,1
OŠETŘENÍ PO MECHANICKÉM ČISTĚNÍ PLETI	4 - 6	1,8
OTLAKY DÁSNÍ	3 - 5	1,2
PARODONTOSIS	6 - 10	5,6
PERIOSTITIS	5 - 15	2,7
PÍŠŤĚLE	4 - 18	1,8
PODKOŽNÍ OTOK	8 - 10	9,3
PSORIASIS	3 - 12	4,8
PSYCHOSTIMULACE	8 - 20	1,7
REGENERACE PLETI	8 - 15	5,8
RHAGADY	5 - 8	5,8
RHINOPHYMA	8 - 16	5,2
RHINITIS	9 - 18	2,9
SPÁLENINY	8 - 20	2,3
STRIAE	8 - 15	5,1
TONSILLITIS	3 - 5	5,3
ULCUS CRURIS	- bérkový vřed	4 - 12
ZÁNĚT DÁSNÍ	1 - 3	2,5
ZÁNĚT NEHTOVÉHO LŮŽKA	6 - 12	2,2

## Cenové katalogy ke stažení

### Produkty

 <b>Katalog Ambu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Katalog_Ambu.pdf</a>	- Anesteziologické a resuscitační přístroje a pomůcky - Ambuvak - Ruční křísící přístroj - AmbuMatic - automatický resuscitační přístroj - Kardiopumpa pro vnější srdeční masáž - Ambu odsávací - Twin pumpa - Dýchací ochranné roušky - Life Key	- Resuscitační masky Res-Cue - Obličejové masky - Laryngeální masky - PEEP ventil - Krční fixační límce - PerFit Ace - Intubační trezážer - Ekg elektrody Blue Senzor	- Figuríny a trezážery - Uniman a Multiman, - Baby manekýn, Ambuman, - Defibrilační trezážer - Tréninkové systémy - Cardiac Care Trainer, - I.V. trezážer
 <b>Anesteziologie</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Anesteziologie.pdf</a>	- Nebulizátory	- Anesteziologické hadice	- Anesteziologické přístroje
 <b>Antidekubitní matrace a Pomůcky pro hygienu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Antidekubitni_matrace.pdf</a>	- Matrace antidekubitní - Pasivní antidekubitní podložky	- Pomůcky pro přesun pacienta	Pomůcky pro hygienu - Koupací vana nafukovací - Bazének na mytí hlavy nafukovací
 <b>Defibrilátory</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Defibrilátor MEDUCORE Easy	- Defibrilátory Primedic™	
 <b>Desinfektory Meiko</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Čističí a desinfekční automat MEIKO	- Meiko Top Topic 2	- Meiko TopLine
 <b>Diagnostické přístroje - otoskopy</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Diagnosticke_pristroje.pdf</a>	- Otoskopy		
 <b>EKG</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Tříkanálové - Šestikanálové	- Dvanáctikanálové	- Spirometrie - Monitory
 <b>Germicidní a baktericidní svítidla a zářiče</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Germicidy.pdf</a>	- Germicidní zářiče - obýčejné prostředí - Germicidní zářiče - vlhké prostředí - Germicidní zářiče uzavřené s ventilátorem	- Germicidní trubice - Germicidní trubice - netřítivá	- Spínací digitální hodiny - Důležité informace k používání germicidních lamp
 <b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Glukometr MediSense - Testovací proužky - Lancetky (jehličky)		- Bezplatná výměna glukometru
 <b>Resuscitační soupravy pro první pomoc - Helper</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Helper.pdf</a>			
 <b>Infúzní pumpy - lineární dávkovače</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_pumpy.pdf</a>	Infúzní pumpa - Alaris Asena GW - nástupce infúzní pumpy IVAC	Lineární dávkovače - Alaris Asena GH PLUS	
 <b>Infúzní stojany</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Infuzni_stojany.pdf</a>	- Infúzní stojan pojízdný - Infúzní stojan pevný	- Infúzní stojan - nasazovací do držáku hrazdy - Infúzní stojan teleskopický	
 <b>Inhalátory</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Inhalatory.pdf</a>	- Ultrazvukové - Kompresorové		
 <b>Míče na cvičení, molitanové míčky, masážní míčky - ježci</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cviceni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Mice_cviceni.pdf</a>	- Míč na cvičení - Masážní míčky (ježci)	- Masážní molitanové míčky - Hustilka	
 <b>Motodlahy Artromot</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Motodlahy.pdf</a>	- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha kolenního kloubu - Motodlaha ramenního kloubu	- Aktivní bezmotorová dlahy kolenního a kyčelního kloubu - Motodlaha loketního kloubu	- Motodlaha hlezenního kloubu - Motodlaha prstů včetně palce - Motodlaha zápěstí
 <b>Odsávací ambulantní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_ambulantni.pdf</a>	- Ambulantní odsávací přenosné - Ambulantní odsávací akumulátorové		
 <b>Odsávací chirurgické Medela</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Odsavacky_Medela.pdf</a>	- Medela Basic 30 - Medela Dominant 50	- Medela Clario - Medela Vario	- MedelaVak - jednorázový odsávací vak - Odsávací láhve a víčka
 <b>Oxymetry pulzní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Oxymetry.pdf</a>	- Oxymetry stolní Nonin - Oxymetry přenosné Nonin	- Oxymetry prstové Nonin - Prstový oxymetr Heal Force®	- Oxymetry MedAir - Kapnometr MedAir
 <b>Postele a lůžka</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Postele_a_luzka.pdf</a>	- Polohovací postele mechanické, - Polohovací postele elektrické, - Polohovací postele dětské,	- Polohovací nemocniční lůžka - Noční stolky - dřevěné, kovové, - Matrace - Polštáře a příkrývky	- Dětské, kojenecké a novorozenecké postýlky - Křesla odpočinková a pro kardiaky - Jídelní stolky
 <b>Redukční ventily</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Redukcni_ventily.pdf</a>	- Redukční ventily - Průtokoměry a zvlhčovače, - Kyslíková terapie,	- Regulátory podtlaku (odsávací) - Kyslíkové masky a brýle - Hadice medicijní tlakové,	- Rychlospojky, nástavce, - Koncentrátor kyslíku
 <b>Rehabilitační přístroje + Vodolčba - vany</b> nabídku zašleme na vyžádání - info@mediset.cz	- Elektroléčebné přístroje - Terapeutické ultrazvuky - Terapeutické lasery - Vakuová jednotka	- Hydrocolon - Parafínová lážeň - Skotské stříky	- Celotělové masážní vany - Vany pro masáž horních končetin - Vířivá vana pro dolní končetiny - Porodnická vana
 <b>Solné čisticí přístroje</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Solne_cisticky.pdf</a>	- Domácí solné jeskyně - Léčba pomocí soli z Karpatkých solných dolů		- Salin Plus - Salin S2

	<b>Sterilizátory horkovzdušné a teplotní technika</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_a_teplotni_technika.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterilizátor Stericell</li> <li>- Sterilizátor Titanox</li> <li>- Sterilizátor Panacea</li> </ul>	- Laboratorní inkubátory, termostaty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecozell</li> <li>- Incucell</li> <li>- Verticell</li> <li>- Durocell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friocell</li> <li>- Vacucell</li> <li>- Climacell</li> <li>- Co2cell</li> </ul>
	<b>Sterilizátory parní</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Sterilizace_parni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterident</li> <li>- Sterimat</li> <li>- Sterilab</li> </ul>	- Unisteri		
	<b>Stolky, vozíky, zástěny, schůdky, židličky</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stolky.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schůdky jednostupňové, dvoustupňové</li> <li>- Zástěny jednodílné, dvoudílné, trojdílné</li> <li>- Vozíky a stolky víceúčelové,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Židličky</li> <li>- Vozíky na sběr špinavého prádla</li> <li>- Vozíky pro ležící pacienty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Křesla přepravní</li> <li>- Vozík na zeměřelé</li> </ul>	
	<b>Stoly operační Ramed</b> nabídku zašleme na vyžádání - <a href="mailto:info@mediset.cz">info@mediset.cz</a>	- Univerzální operační stoly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S výměnnou pracovní deskou</li> <li>- S plovoucí deskou</li> </ul>		
	<b>Stoly rehabilitační a masážní Jordan</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Stoly_rehabilitacni.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitační stoly</li> <li>- Masážní stoly</li> <li>- Masážní gymnastické lůžko</li> <li>- Stoly elektrické</li> <li>- Stoly hydraulické</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyšetřovací terapeutická lehátka</li> <li>- Trakční stůl</li> <li>- Osteopatické lehátka</li> <li>- Vojtův stůl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transfúzní křesla</li> <li>- Gynekologické stoly</li> <li>- Vertikalizační stůl</li> <li>- Skládací stůl</li> <li>- Skládací přenosné masážní židle</li> </ul>	
	<b>Světloléčba - Biolampa polarizační</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svetlolecba-Biolampa.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biolampa polarizační</li> <li>- Léčba světlem</li> </ul>			
	<b>Svítilna vyšetřovací</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Svitidla.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna operační Martin</li> <li>- Svítilna vyšetřovací Martin (ceny pouze na vyžádání konkrétního modelu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svítilna vyšetřovací LHH</li> <li>- Čelní operační a vyšetřovací diodová svítilna</li> </ul>		
	<b>Systém intraoperačního ohřevu</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-System_intraoperacniho_ohrevu.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhřívací podušky pro pacienty</li> <li>- Bair Hugger</li> </ul>			
	<b>Toaletní program</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Toaletni_program.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomůcky do vany</li> <li>- sedačky do vany,</li> <li>- sedačky do sprchy,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chodítka,</li> <li>- Vanový zvedák Aqua Joy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klozetová křesla a nástavce,</li> <li>- Toaletní křesla,</li> <li>- zkracovače</li> </ul>	
	<b>Tonometry, fonendoskopy, teploměry, tens, tukoměry, krokoměry</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Tonometry.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tlakoměry, měřiče tlaku</li> <li>- Digitální měřiče krevního tlaku a pulsu pro lékaře i pro domácí použití</li> <li>- Beztlučkové tonometry</li> <li>- Hodínkové - anerooidní tonometry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonendoskopy</li> <li>- Porodnické stetoskopy</li> <li>- Tukoměry,</li> <li>- digitální váhy s měřením tuku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teploměry bezkontaktní</li> <li>- Teploměry,</li> <li>- TENS přístroje,</li> <li>- Krokoměry</li> </ul>	
	<b>Váhy Seca</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Vahy_Seca.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy kojenecké</li> <li>- Digitální váhy</li> <li>- Mechanické váhy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lékařské váhy sloupkové</li> <li>- Výškoměry</li> <li>- Měřítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedačkové váhy</li> <li>- Postelové váhy</li> </ul>	
	<b>Záchraný systém</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Zachranny_system.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakuové fixační dlahy</li> <li>- Vakuové matrace</li> <li>- Transportní vyprošťovací plachty</li> <li>- Transportní dělitelná nosítka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zádová vyprošťovací dlahy</li> <li>- Závěsný vak pod helikoptéru</li> <li>- Zdravotnická nosítka</li> <li>- Vaky pro zeměřelé</li> <li>- Lehká deka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohotovostní a záchranné rucksaky</li> <li>- Kufry a tašky na obzavový materiál</li> <li>- Lékařské kufry</li> <li>- Záchraná fólie</li> <li>- Fixační dlahy s možností extenze</li> </ul>	

## Služby

	<b>Náklady na expedici, ceník dopravy zboží</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Cenik_dopravy.pdf</a>		
	<b>Pronájem lůžek Linet</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-pronajem_luzek.pdf</a>	- Lůžko Termo Plus a antidekubitní matrací	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novorozenecká postýlka Mimi</li> <li>- Křeslo Komfort 04</li> </ul>
	<b>Glukometry - měřiče cukru v krvi</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/www_mediset_cz-Glukometry.pdf</a>	- Bezplatná výměna starých a nefunkčních glukometrů za nový typ glukometru MediSense	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informace pro pojištěnce</li> <li>- testovací proužky - úhrada VZP</li> </ul>
	<b>Postup při předepisování pomůcky na poukaz</b> <a href="http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf">http://www.mediset.cz/obrazky/download/Postup_pri_predepisovani_pomucky_na_poukaz.pdf</a>		- Návod pro pojištěnce

Přístroje označené tlačítkem si můžete zakoupit v našem e-shopu:

**e-shop**  
**MEDISET # CHIRONAX**  
<http://www.mediset.cz/eshop>

Prohlížíte-li si katalog v pdf - on-line, stačí kliknout na odkaz vedle tlačítka.