

## 3M™ Coban™ Samofixační elastické obinadlo

Nesterilní

**Popis:** Samofixační elastické obinadlo 3M™ Coban™ je vícevrstvé obinadlo z netkaného materiálu a elastických vláken uspořádaných v podélném směru, což zajišťuje jeho potřebnou pružnost. Obinadlo obsahuje přilnavý materiál, který je adhezivní pouze sám k sobě, nikoli k pokožce nebo jiným materiálům. Výrobek je dodáván buď v nesterilním, nebo ve sterilním provedení.

**Indikace:** Samofixační elastické obinadlo Coban je určen pro použití v případech, kdy je potřeba zajistit pružné upevnění, a to za účelem komprese nebo při upevnění obvazů nebo pomůcek.

**Upozornění:** Podobně jako u všech ostatních pružných obinadel je třeba pravidelně sledovat místo aplikace po zda nedochází k zblednutí, otoku či poruchám oběhu.

### Preventivní opatření:

1. Samofixační elastické obinadlo Coban po aplikaci neposunujte. Je třeba jej aplikovat jen s použitím přiměřeného tahu.
2. Samofixační elastické obinadlo Coban nesmí přijít do bezprostředního styku s otevřenou ránou.
3. Výrobek obsahuje přírodní latex, který může u některých osob způsobit alergické reakce.

### Způsob použití:

1. Odviňte asi 30 cm z roličky obinadla Coban a ponechte uvolnit jeho napětí.
2. Bez dalšího vytahování použijte celou tuto délku. Část nalepenou na koncovém místě lehce přitiskněte.
3. Pokračujte s nalepováním, přičemž použijte jen takové napětí, jaké je třeba k docílení požadované komprese. Před nalepením odviňte z roličky více obinadla Coban, aby nebylo aplikováno s příliš velkým napětím.
4. Po dokončení aplikace odstříhnete zbytek obinadla Coban. Konec upevněte opatrným přitisknutím.

**Skladování a životnost:** Výrobek je nutno skladovat při pokojové teplotě 15-30°C. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud je samolepicí obinadlo Coban až do okamžiku skladován ve svém originálním obalu. Datum použitelnosti je vytištěno na jednotlivém balení.

**Informace pro objednání:** Dodává se v krabicích s jednotlivě balenými roličkami. Rozvinutá délka role je 4,5 m.

