

3M™ Tegaderm™ Roll

Transparentní film v roli



- Nepropustný pro vodu a tvoří bariéru proti bakteriím i virům.
- Přizpůsobivý, elastický a prodyšný.
- Lze jej snadno stříhat na míru a rohy lze podle potřeby tvarovat a zaoblovat.
- Přizpůsobí se obrysům těla a následuje pohyb kůže.

3M™ Tegaderm™ Roll

Transparentní film v roli



S Tegadermem v roli se pracuje velmi snadno, dokonce i v rukavicích.

Dvoudílný aplikační rámeček umožňuje přidržet a umístit obvaz a zároveň si udržet dokonalý přehled o ošetřovaném místě.

Indikace pro použití

- Ochrana ohrožené kůže před mechanickým poškozením a tělesným tekutinami.
- Voděodolná fixace primárních obvazů, například gázy, alginátů, pěnových materiálů atd.
- Fixace zdravotnických pomůcek (epidurálních katétrů, drénů, hadiček atd.)

Díky snadnému způsobu aplikace je Tegaderm v roli dokonalým řešením všude, kde je potřeba použít obvaz s vodotěsným krytím.

Způsob aplikace




1
Odstříhnete potřebnou délku (z role v původní krabici) a odstraníte bílou vrstvu na zadní straně (označeno 1).



2
Držte obvaz za postranní aplikační chlopně. Vycentrujte film nad obvazem nebo místem vyžadujícím fixaci a přiložte ho bez napínání.



3
Odstraňte aplikační chlopně (označeno 2) a lehce vyhladte obvaz.

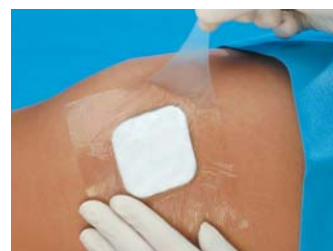

Odstranění
Uvolněte okraj filmu (můžete si pomoci kouskem jiné chirurgické náplasti) a pomalým napínáním filmu směrem od pokožky dojde k jeho postupnému odstranění. VŽDY přidržujte pokožku pacienta druhou rukou, aby nedošlo k jejímu poškození.

Informace pro objednání:

Číslo výrobku	Velikost	Balené množství
16002	5 cm x 10 m	4 role
16004	10 cm x 10 m	4 role
16006	15 cm x 10 m	4 role

Upozornění

Nejedná se o sterilní výrobek. Nepoužívejte ho na porušenou kůži, otevřené rány nebo k fixaci i.v. katétrů a primárnímu krytí invazivních vstupů.



3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

Tel: 261 380 111

www.3m.cz/zdravotnictvi

© 3M a Tegaderm jsou ochranné známky 3M.